

Powerlink 操作上のチェックポイント

操作

1. デュアルルーメンカテーテル(DLC)のクロスオーバー操作
2. デュアルルーメンカテーテル(DLC)への対側脚ガイドワイヤーと
デリバリーカテーテル用ワイヤーの挿入操作
3. デリバリーカテーテル挿入時におけるサイドポート(三方活栓付)の位置確認
4. デリバリーカテーテルと対側脚ガイドワイヤーとの絡みの確認
5. 造影による腎動脈及び内腸骨動脈との位置確認
6. フロントストップの位置確認
7. 腹部大動脈瘤内での対側脚部開脚及び同側脚部の格納
8. スtentグラフト本体部(メインボディ部)の展開
9. フロントストップとフロントシースの同時回収・アウトシース内での
同側脚展開確認
10. 対側脚側の内腸骨動脈造影及び位置確認と対側脚部展開
11. 同側脚部展開操作
12. 中枢ネック・同側脚部・対側脚部への必要に応じたバルーンニング
13. 確認造影
14. 補助デバイスの選択と操作方法の確認